

5 Alarmes et dispositifs de sécurité

Si une alarme se déclenche :



Couper le son de l'alarme (si désiré)

Détecter la cause et prendre les mesures appropriées



Arrêter l'alarme




Reprendre l'administration




Batterie vide

Brancher immédiatement la pompe sur l'alimentation secteur.

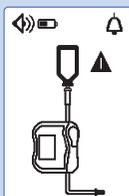


Poche vide/ Présence d'air dans la tubulure

Si la poche est vide, changer la poche. Dans le cas contraire, vérifier qu'il n'y a pas de bulles d'air dans la tubulure.

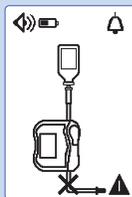


Occlusion aval

Vérifier qu'il n'y a pas d'occlusion dans la tubulure située après la pompe, du côté patient.

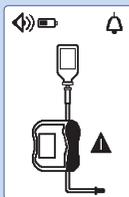

Porte ouverte

Fermer la porte de la pompe.

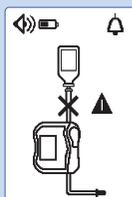


Occlusion amont

Vérifier qu'il n'y a pas d'occlusion dans la tubulure située entre la poche et la pompe.



Volume cible presque atteint

Continuer l'administration: il reste 59 minutes maximum avant d'atteindre le volume cible.

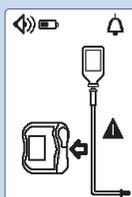


Installation de la tubulure

Contrôler la position de la tubulure en entrée et en sortie du mécanisme de la pompe et l'insérer correctement.



Volume cible atteint

Arrêter l'administration.

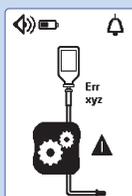

Erreur technique

Relever le code erreur technique (Err xyz) et contacter le personnel chargé de la maintenance de la pompe.



Rappel de démarrage

Passer à l'étape suivante ou arrêter la pompe.

MEDICAL DEVICES*

Amika®

POMPE À NUTRITION ENTÉRALE



ZZ10305

210305_quick_guide_amika_FR 11/2012



Lire la notice d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.

En raison de l'évolution des normes, de la législation et du matériel, les caractéristiques indiquées dans le texte et sur les images de ce document s'appliquent uniquement à l'appareil joint.

* Dispositifs médicaux


** Prendre soin de la vie

 **FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi AG
D-61346 Bad Homburg v.d.H
Germany
Phone +49 (0)6172 686-0
www.fresenius-kabi.com

 **FRESENIUS
KABI**
caring for life**

1 Installation de la tubulure

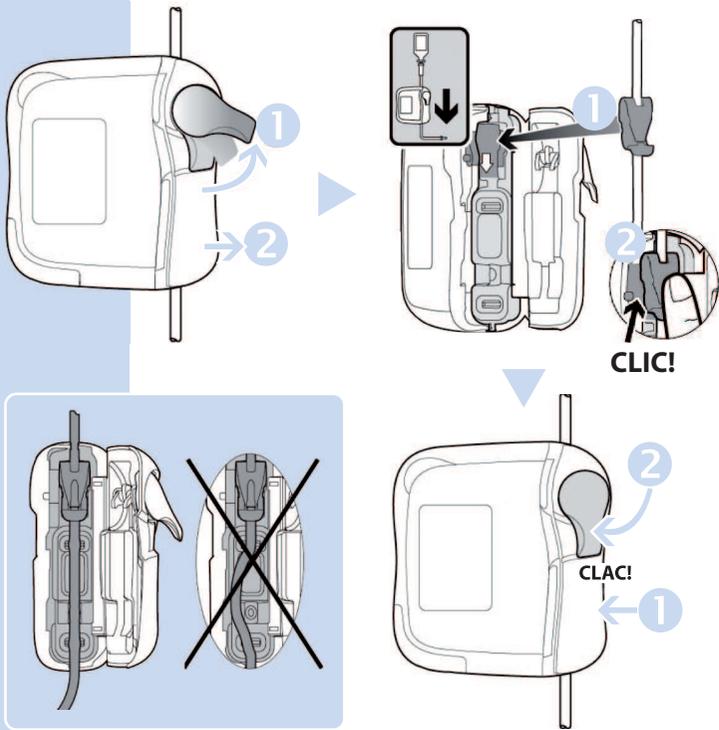

2 Description de l'interface




3 Fonctionnement de la pompe

3.1 Allumer la pompe




3.2 Purger la tubulure

Purge automatique (~1 min 45 s)

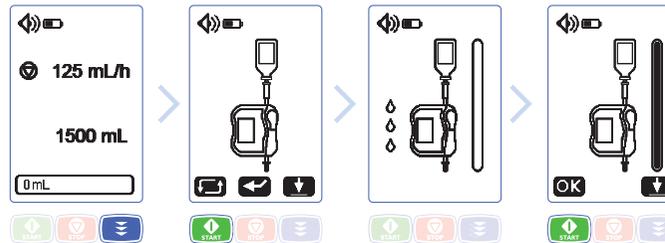

Purge semi-automatique

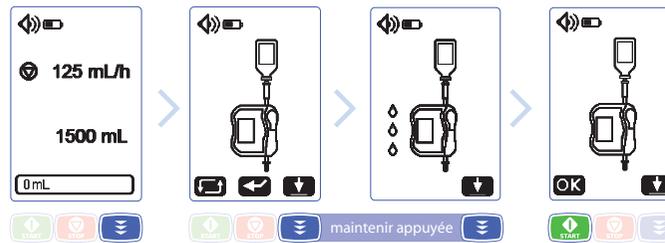

3.3 Régler le débit (mL/h)



3.4 Régler le volume cible (mL)



3.5 Démarrer l'administration

(Après purge de la tubulure)



Appui long > 2 s :
réinitialisation de la
barre de progression

Verrouiller les touches



Appui long > 2 s

Éteindre la pompe




Appui long > 2 s

4 Menu

Arrêter l'administration

puis appuyer sur la touche MENU

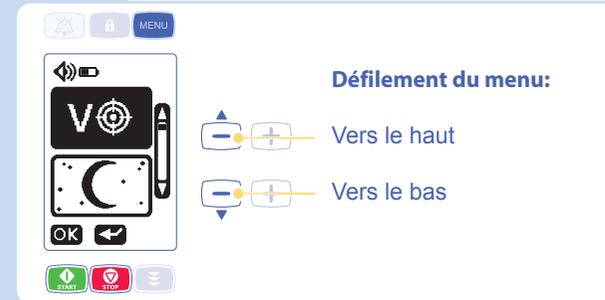

Entrer dans un menu ou
valider une action



Activation / désactivation du volume cible

Activation / désactivation du Mode nuit

Réglages sonore

Activation / désactivation du Verrouillage réglages (code d'accès nécessaire)

Compteur de volume total administré

Historique des alarmes

Historique des administrations

Réglage Contraste / luminosité

Réglage du temps entre 2 sons d'alarme (code d'accès nécessaire)

Ajustement du temps entre le message "Volume cible presque atteint" et l'alarme "Volume cible atteint" (code d'accès nécessaire)

Revenir à l'écran précédent

